



Каталог 2024

Garrison
Dental Solutions

МАТРИЧНІ СИСТЕМИ

Секційні матричні системи

Strata-G™	3-12
Composi-Tight® 3D Fusion™	13-18
Інші матричні системи.	19-20

Традиційні матриці типу Tofflemire

Slick Bands™ матриці.	25-27
-----------------------	-------

Антеріальні матриці

VariStrip™	30-31
Fusion Anterior™	32-33

Клинці

Пластикові

Composi-Tight® 3D Fusion™ клинці	28
WedgeWands®	29
A+Wedge®	29

Важливі аксесуари

Щипці

Composi-Tight® 3D Fusion™ щипці для кілець...	38
Універсальні щипці для кілець.	38
Composi-TightB® щипці для матриць.	39

Інструменти

PerForm™ формувач контактів.	37
------------------------------	----

Інструменти для роботи з композитом

5-в-1 інструменти	40
-------------------	----

Важлива інформація

Кільця.	21-22
Матриці.	23-24
Клинці.	34-35
Стерилізація та очистка.	41
Онлайн магазин.	42

Зміст



Клінічний випадок Контактна зона з секційною матричною системою Strata-G™

Dr. Vincenzo Attanasio

Оптимізація форми та контурного профілю інтерпроксимальної стінки є найделікатнішою фазою всього консервативного лікувального робочого процесу для уражень класу II. У цьому випадку реставрували ураження мезіальної стінки 16-го зуба.



Мал. 1: Доопераційний вигляд квадранта 1. Зуб 16 з каріозним ураженням мезіальної стінки.



Мал. 2: Розкриття мезіальної інтерпроксимальної коробки 16 зуба.



Мал. 3: Адаптація фіолетової матриці Strata-G™ SG175. Тоноване неприлипаюче покриття дозволяє ідеально бачити крайове прилягання матриці до пришийкової сходинок. Матриця поєднується з використанням синього інтерпроксимального клинця та кільця Strata-G™ Universal.




Мал. 4: Вибіркове протравлювання емалі.



Мал. 5: Нанесення універсального адгезиву.



Мал. 6: Відновлення мезіальної інтерпроксимальної стінки на 16 зубі за допомогою техніки доцентрового нарощування.

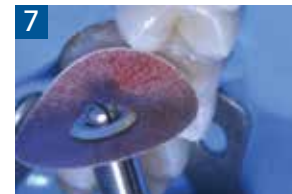

Мал. 7: Коригування за допомогою абразивних дисків коронкової та букколінгвальної зон у контактній зоні.



Мал. 8: Полірування пришийкової області за допомогою системи FitStrip™.



Мал. 9: Анатомо-функціональне відновлення мезіальної стінки 16 зуба.



Мал. 10: Оклюзійний вигляд готової та відполірованої реставрації.




Мал. 11: Лінгвальна деталізація анатомії, переданої інтерпроксимальній стінці за допомогою матричної системи Strata-G™.

NEW

STRATA-G™

Секційна матрична система

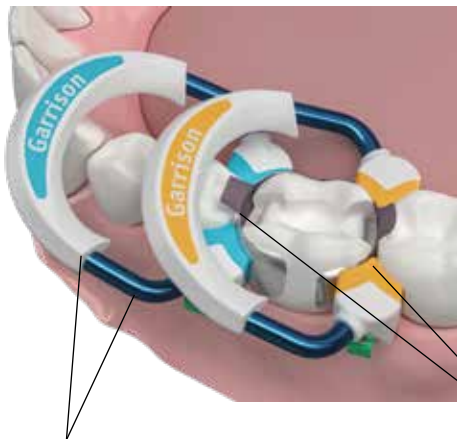

Надійні, щільні контакти

Кільця, виготовлені з нікель-титану та спеціального пластикового матеріалу РЕЕК, довше зберігають стабільне зусилля! Надзвичайно міцний матеріал РЕЕК збільшує тиск, що прикладається для сепарації зубів і продовжує термін служби кільця.

Пришвидщення та полегшення реставрацій Класу II

Strata-G™ кільця, матриці та клинці в комбінації формують кругове ущільнення 270° Seal™ для максимального уникнення небажаних проміжків. Кільця не будуть зісковзувати з зубів, а зелене кільце для надшироких реставрацій зробить їх виконання надзвичайно легким.

Простіші, більш передбачувані контури

Матриці та кільця мають спеціальні розширення для покращеного формування крайових гребенів, що чудово допомагає створити неперевершений фінішний стиль!



*See how
it works!*

Strata-G™ формує 270° Seal™ ущільнення без проміжків!

STRATA-G™

Секційна матрична система

NEW

Тепер кільце можна розмістити з обох сторін!



SG-KSH-10



КОД	ОПИС
SG-KSH-10 "Все в одному" набір	1 кільце Strata-G™ синє 1 кільце Strata-G™ оранжеве 1 кільце Strata-G™ зелене 80 клинців Strata-G™ в асорт. 50 матриць Strata-G™ в асорт. 50 матриць Composit-Tight™ 3D Fusion™ в асорт. 10 антеріальних матриць VariStrip™ 5 матриць Margin Elevation Bands 1 щипці для встановлення кілець
SG-KS-40 Стандартний набір	1 кільце Strata-G™ синє 1 кільце Strata-G™ оранжеве 1 кільце Strata-G™ зелене 40 клинців Strata-G™ в асорт. 50 матриць Strata-G™ в асорт. 1 щипці для встановлення кілець

NEW

STRATA-G™

Секційна матрична система



SG-KH-00

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands матриці з технологією eZ-Place™ не піддаються надлишковим деформаціям при встановленні, значно спрощуючи їх розміщення!

код	опис
SG-KH-00 Інтро-набір з матрицями Firm Bands	1 кільце Strata-G™ синє 1 кільце Strata-G™ оранжеве 1 кільце Strata-G™ зелене 80 клинців Strata-G™ в асорт. 100 матриць Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands в асорт. 1 щипці для встановлення кілець
SG-KH-40 Стандартний інтро-набір з матрицями Firm Bands	1 кільце Strata-G™ синє 1 кільце Strata-G™ оранжеве 1 кільце Strata-G™ зелене 40 клинців Strata-G™ в асорт. 50 матриць Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands в асорт. 1 щипці для встановлення кілець



Зелене кільце Strata-G™ для широких реставрацій

- Добре тримається навіть на частково зруйнованих стінках зуба
- Особливо добре підходить для надшироких порожнин.
- Широкі силіконові щічки запобігають вдавненню матриці в порожнину.

код SG600 (2 шт./уп.)



Оранжеве кільце Strata-G™ — тепер всі кільця із нітинулу

- З нікель-титанового дроту, який одночасно надміцний та еластичний.
- Фіксуючі кінчики Ultra-Grip™ запобігають зісковзуванню всіх кілець Strata-G™.
- Добре тримається навіть на великих молярах.

код SG500 (2 шт./уп.)



Синє кільце Strata-G™ тепер відкривається ще легше

- Оптимальна адаптація до крайового гребеню завдяки покращеному силікону подушечок кільця StrataBond™.
- Особливо добре підходить для коротких/неправильного розташування зубів і в дитячій стоматології.

- Також добре тримається над клампами рабердама або дистально на іклі.

код SG400 (2 шт./уп.)

код	опис
SG600	Strata-G™ зелене кільце, 2 шт./уп.
SG600-1	Strata-G™ зелене кільце, 1 шт./уп.
SG500	Strata-G™ оранжеве кільце, 2 шт./уп.
SG500-1	Strata-G™ оранжеве кільце, 1 шт./уп.
SG400	Strata-G™ синє кільце, 2 шт./уп.
SG400-1	Strata-G™ синє кільце, 1 шт./уп.
SGR01	Strata-G™ набір кілець, по 1шт. кожного кільця
FXP01	Щипці для встан. кілець



Секційна матрична система



Менші і довговічніші за конструкцією

Поєднання найсучасніших матеріалів та конструкції, задля створення нашого найдовговічнішого та найпередбачуванішого сепаратійного кільця!



Сильна сепарація зубів і при цьому легкість розкриття кільця

Нітиновий дріт, нікель титан на молекулярному рівні забезпечує відмінні робочі характеристики основи кільця, і при цьому зберігає помірний рівень необхідного зусилля для його розкриття. Запатентована система StrataSet™ від Garrison максимізує використання сучасних матеріалів для досягнення безпрецедентної довговічності роботи.

Більше циклів використання


Надміцне посилення з РЕЕК-пластику в задній частині, дозволяє кільцям Strata-G™ зберігати високий рівень сепаратійного зусилля навіть після багатьох циклів використання, в порівнянні зі звичайними кільцями. Запатентований силікон StrataBond™ в поєднанні з РЕЕК-пластиком робить подушечки кілець Garrison стійкими до сотень повторюваних циклів використання.

Покращена анатомія - неперевершене зчеплення

Більш виражений гребінь краще направляє та підтримує матриці згори.

StrataBond™ силікон для уникнення небажаних проміжків.

Ultra-Grip™ спеціальні подовження подушечок забезпечують чіпке зчеплення та не травмують сосочок.

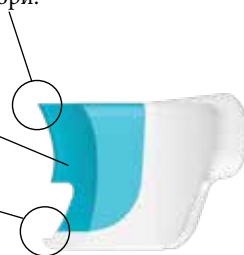

STRATA-G™

Секційна матрична система

	премолярна	премолярна, з цервікальним розширенням	премолярна, мала молярна	молярна	молярна, з цервікальним розширенням
Strata-G™ матриці зі стійким до прилипання покриттям					
0,040 мм					
код	SG050	SG100	SG175	SG200	SG300
висота	3,5 мм	4,5 мм	5,5 мм	6,5 мм	7,5 мм
кількість	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.
код	SG050-M	SG100-M	SG175-M	SG200-M	SG300-M
висота	3,5 мм	4,5 мм	5,5 мм	6,5 мм	7,5 мм
кількість	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.




Garrison
Dental Solutions

код	опис
SGB01	Набір матриць, в асорт. всіх розмірів, 400 шт. (по 80 шт. кожних SG050, SG100, SG175, SG200, SG300)
SGB02	Набір матриць, в асорт. всіх розмірів, 200 шт. (по 40 шт. кожних SG050, SG100, SG175, SG200, SG300)



Легке видалення матриць завдяки їх стійкому до прилипання покриттю, яке знижує адгезію до композиту на вражаючі 92%.

Покращена можливість формування крайового гребеня завдяки більш вираженому контуру матриці в її оклюзійній частині.

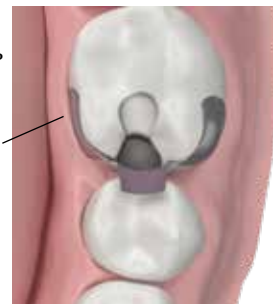

STRATA-G™

Секційна матрична система

NEW

Анатомічність згори донизу

П'ять типорозмірів надтонкої нержавіючої сталі, як м'якої, так і міцної, гарантують, що ви матимете найкращий вибір матриці для кожного випадку реставрацій.



Оптимізований крайовий гребінь

Strata-G™ матриці забезпечують формування та орієнтування крайового гребеню реставрацій класу-II і при цьому не блокують вам доступ до робочої зони.



ProfileBooster™ субгінгівальний фартух

Досягти природного профілю поверхні в складних цервікальних ділянках тепер легко з цими особливими матрицями Strata-G™!



- Неприлипаючі, кольорове кодування
- Вушка для легкого встановлення

- М'які, товщиною всього 0,040 мм
- НОВИЙ педодонтичний розмір!

STRATA-G™


Секційна матрична система

код	опис	к-ть.
SGYL	надмалі, жовті	100 шт.
SGBL	малі, сині	100 шт.
SGOR	середні, оранжеві	100 шт.
SGGR	великі, зелені	100 шт.
SGYL-M	надмалі, жовті	50 шт.
SGBL-M	малі, сині	50 шт.
SGOR-M	середні, оранжеві	50 шт.
SGGR-M	великі, зелені	50 шт.



набір	опис	к-ть.
SGK4-M	Набір клинців, в асорт. всіх розмірів, 200 клинців (по 50 шт. кожних SGYL, SGBL, SGOR, SGGR)	200 шт.
SGK4	Набір клинців, в асорт. всіх розмірів, 400 клинців (по 100 шт. кожних SGYL, SGBL, SGOR, SGGR)	400 шт.

Гладка тунелеподібна конструкція і закруглені краї ковзають по сосочку зі значно меншою травматичністю.

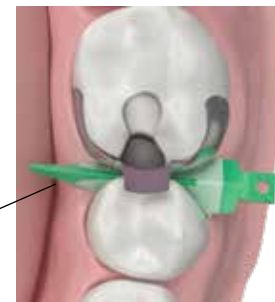

STRATA-G™

Секційна матрична система

Гнучкість для покращеного цервікального ущільнення

У клинцях Strata-G™ використовуються матеріал Soft-Face™ і передова конструкція для максимально покращеного встановлення.

Запобігання вислизанню клинців!

Завдяки м'яким гребінцям фіксація клинців Strata-G™ надзвичайно надійна - вислизання клинців вже давно в минулому!

Конструктивно краще ущільнення!

Інвертована V-подібна форма дає змогу досягати максимально глибокого інтерпроксимального ущільнення, в той час як м'яка Soft-Face™ TPE поверхня клинців Strata-G™ легко адаптується до увігнутостей і нерівностей оточуючих поверхонь.

Можливість каскадування!

Гладка тунелеподібна конструкція легко вміщує встановлення клинців. Ця особливість надзвичайно корисна у випадках рецесії ясен, або коли потрібне одночасне встановлення клинців зі щічної та лінгвальної сторін.





Клінічний випадок

Диференційоване позиціонування матриць Composit-Tight® 3D Fusion™ Firm

Prof. Nicola Scotti, DDS, PhD

У випадках множинних порожнин на постеріальних зубах може трапитися так, що доступний простір між цервікальними краями відрізняється від зуба до зуба, що змушує нас мати секційні матриці з різною опуклістю, щоб в результаті гарантувати належні профілі інтерпроксимальних стінок.

Матриці Composit-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands є надзвичайно універсальним рішенням, яке дозволяє, змінюючи їх горизонтальне розташування, використовувати різні ступені опуклості, якими володіють ці матриці: вони більш опуклі в центрі, та менш опуклі ближче до своїх кінців.



Мал. 1 Враховуючи різні кути задніх зубів, ці порожнини демонструють інтерпроксимальні ділянки з дуже різною анатомічною структурою та профілями.



Мал. 2 Позиціонування матриць Composit-tight 3D Fusion Firm. Зверніть увагу, особливо між 1.4 і 1.5, як матриці були розташовані в шаховому порядку, використовуючи різні ступені їх опуклості, типові для цих матриць.



Мал. 3 Тепер можна встановити сепараційне кільце Composit-Tight® 3D Fusion™. Основним є використання спеціальних щипців, одиниць, які здатні достатньо розкрити кільце та дозволяють його легко позиціонування.



Мал. 4 Відреставровані композитом інтерпроксимальні стінки



Мал. 5 Фінальний вигляд перед зняттям рабердама.

Composi-Tight® 3D Fusion™

Секційна матрична система



Зелене кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ для широких реставрацій

Це кільце чудово підходить для широких препарувань і добре тримається навіть при частково зруйнованій стінці зуба. Широкі силіконові подушечки запобігають втисканню матриці всередину в порожнину. код FX600 (2 шт./уп.)



Оранжеве кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ з покращеним утриманням

Всі кільця матричної системи Composi-Tight® 3D Fusion™ оснащені спеціальними подовженнями подушечок Ultra-Grip™. Покращена форма подушечок допомагає кільцю особливо добре триматися на великих молярах. код FX500 (2 шт./уп.)



Популярне синє кільце Composi-Tight®

Кільце 3D Fusion™ тепер відкривати ще легше. Кільце має покращену адаптивність і анатомічність завдяки м'яким силіконовим подушечкам. Це кільце ідеально працює на коротших та нерівно розташованих зубах, добре утримується поверх кламів рабердама, чи між іклом та першим моляром. код. FX400 (2 шт./уп.)

Wide Prep
technique
video



Ring
placement
tip



код	опис
FX600	Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring Wide Prep зелене кільце 2 шт./уп.
FX600-1	Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring зелене кільце, 1 шт.
FX500	Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring оранжеве кільце 2 шт./уп.
FX500-1	Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring оранжеве кільце, 1 шт.
FX400	Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring синє кільце 2 шт./уп.
FX400-1	Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring синє кільце, 1 шт.
FXR01	Набір з 3 кілець (1 зелене, 1 оранжеве, 1 синє)
FXP01	Composi-Tight® 3D Fusion™ щипці для встановлення кілець

СТЕРИЛІЗУЙТЕ КІЛЬЦЯ ЛИШЕ В АВТОКЛАВІ

Composi-Tight® 3D Fusion™

Firm Matrix Bands



FX-HHF-00



Більш пружні матриці Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands на 70% краще опираються невимушеним деформаціям в процесі роботи, ніж інші матриці, та при цьому залишаються надзвичайно тонкими з товщиною 0,038 мм.

КОД	ОПИС
FX-HHF-50	1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ синє 1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ оранжеве 40 клинців Composi-Tight® 3D Fusion™ в асорт. 40 матриць Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands в асорт. 1 щипці Composi-Tight® 3D Fusion™ для встановлення кілець
FX-HHF-40	1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ синє 1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ оранжеве 1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ зелене 40 клинців Composi-Tight® 3D Fusion™ в асорт. 40 матриць Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands в асорт. 1 щипці Composi-Tight® 3D Fusion™ для встановлення кілець
FX-HHF-00 VM "Все в одному" набір	1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ синє 1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ оранжеве 1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ зелене 80 клинців Composi-Tight® 3D Fusion™ в асорт. 70 матриць Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Bands в асорт. 1 щипці Composi-Tight® 3D Fusion™ для встановлення кілець 4 антеріальних матриці VariStrip™ 5 матриць Margin Elevation Bands



Composi-Tight® 3DFusion™

Firm Matrix Bands



Find out more!

	премолярна	премолярна, з цервікальним розширенням	премолярна, мала молярна	молярна	молярна, з цервікальним розширенням
Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm матриці з технологією eZ-Place™ для полегшеного встановлення.					
товщина 0,038 мм					
код	FXH100	FXH150	FXH175	FXH200	FXH300
висота	4,3 мм	5,9 мм	5,3 мм	6,1 мм	7,7 мм
к-ть.	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.
код	FXH100-M	FXH150-M	FXH175-M	FXH200-M	FXH300-M
висота	4,3 мм	5,9 мм	5,3 мм	6,1 мм	7,7 мм
к-ть.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.

New
eZ-Place™
technology

Матриці Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm bands з технологією eZ-Place™ є надзвичайно стійкими до невимушених деформацій при встановленні, значно спрощуючи їх розміщення!

Ідеально підійдуть для:

- Щільних інтерпроксимальних зон
- Новачків та лікарів з досвідом!

матриці Firm Bands:

- На 70% краще опираються випадковим деформаціям!
- Супер тонкі, товщиною всього 0.038 мм
- В 5-ти ідеальних розмірах!



код	опис
FXHB04	Набір матриць, в 5 розмірах, 300 шт.
FXHB05	Міні-набір матриць, в 5 розмірах, 150 шт.
BFA-1	Щипці для матриць Composi-Tight®

Composi-Tight® 3D Fusion™

Секційна матрична система



FX-KFF-00 VM

Find out
more!



Подушечки зі спеціальним
силіконовим покриттям Soft-Face™
максимально якісно огортають
матриці допомагаючи вам
відтворити щільні
інтерпроксимальні контакти та
виконати бездоганні реставрації.

Garrison
Dental Solutions

КОД	ОПИС
FX-KFF-00 VM "Все в одному" набір	1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ синє 1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ оранжеве 1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ зелене 80 клинців Composi-Tight® 3D Fusion™ в асорт. 70 матриць Composi-Tight® 3D Fusion™ в асорт. 1 щипці Composi-Tight® 3D Fusion™ для встановлення кілець 4 антеріальних матриці VariStrip™ 5 матриць Margin Elevation Bands
FX-KFF-50	1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ синє 1 кільце Composi-Tight® 3D Fusion™ зелене 40 матриць Composi-Tight® 3D Fusion™ в асорт. 40 клинців Composi-Tight® 3D Fusion™ в асорт. 1 щипці Composi-Tight® 3D Fusion™ для встановлення кілець

Composi-Tight® 3D Fusion™

матриці зі стійким до прилипання покриттям

Адаптуються до будь якої форми зубів!

Охоплюючі – матриці з унікальним дизайном добре охоплюють зуб, полегшуючи подальше встановлення фіксуючого кільця.

Вушка для зручного розміщення – спеціальні вушка Grab-Tab™ зверху кожної матриці значно полегшать маніпуляції з ними, незалежно від інструменту який ви використовуєте для їх встановлення.

Глибше та ширше – покращене субгінгивальне розширення та збільшена окружна довжина матриць покращать результати реставрацій навіть в самих складних випадках.

Легко встановлювати – завдяки вигнутій поверхні матриці мають неочікувано високу пружність, завдяки чому їх легко встановлювати.

Легко видаляти – матриці мають спеціальне покриття Slick Bands™, яке запобігає їх прилипанню до робочих матеріалів та поверхонь.



See how it works!

	премолярна	премолярна, з цервікальним розширенням	премолярна, мала молярна	молярна	молярна, з цервікальним розширенням
Composi-Tight® 3D Fusion™ матриці					
0,038 мм товщина					
код висота к-ть	FX100 4,4 мм 100 шт.	FX150 6,0 мм 60 шт.	FX175 5,6 мм 100 шт.	FX200 6,6 мм 100 шт.	FX300 8,7 мм 60 шт.
код висота к-ть	FX100-M 4,4 mm 50 шт.	FX150-M 6,0 мм 30 шт.	FX175-M 5,6 мм 50 шт.	FX200-M 6,6 мм 50 шт.	FX300-M 8,7 мм 30 шт.

код	опис
FXB02	Composi-Tight® 3D Fusion™ набір матриць, 210 шт. (по 50 шт. FX100, FX175 і FX200, та по 30 шт. FX150 і FX300)
BFA-1	Щипці для матриць



Набір матриць Composi-Tight® 3D Fusion™ в 5 розмірах, всього 210 шт.

FXB02

Composi-Tight® 3D XR ::

Секційна матрична система



Composi-Tight® 3D XR Soft-Face™ кільце — це ультратонке матричне кільце, розроблене для використання з короткими або неправильно розміщеними зубами, включаючи ділянки між іклом і першим премоляром.

Оранжеве кільце **Soft-Face™ 3D** забезпечує максимальну легкість розміщення та адаптації до різноманітних анатомічних структур зубів, одночасно зменшуючи вірогідність виникнення небажаних проміжків

Будь ласка, завжди використовуйте рабердам і наші Garrison щипці для розміщення кілець задля безпечного поводження.

КОД	ОПИС	К-ТЬ.
3D500	кільця Soft-Face™ 3D, оранжеве	2 шт.
3D500-1	кільце Soft-Face™ 3D, оранжеве	1 шт.
3DXR	кільця Soft-Face™ XR, синє	2 шт.
3DXR-1	кільце Soft-Face™ XR, синє	1 шт.

Composi-TightGold®

Друга генерація системи Composi-Tight® все ще залишається улюбленою для багатьох лікарів.



код	опис	К-ТЬ.
AU400	G-Rings™ кільця стандартної довжини	3 шт.
AU500	G-Rings™ кільця, подовжені зубці	3 шт.
AUMRDF-100	Щипці для кілець	

Composi-Tight®

Наша Original система, що започаткувала стандарт щільних та анатомічних контактів.

код	опис	К-ТЬ.
G100	G-Ring™ кільця стандартної довжини	3 шт.
G200	G-Ring™ кільця, подовжені зубці	3 шт.
AUMRDF-100	Щипці для кілець	

Composi-Tight Gold® матриці

Composi-Tight Gold 0,035 мм	 AU050	 AU100	 AU150	 AU200	 AU300
призначення	педіатричні	премолярні	премолярні, з розширенням	молярні	молярні, з розширенням
висота	3,2 мм	4,6 мм	3,8 мм	6,4 мм	6,4 мм
К-ТЬ.	50 шт.	100 шт.	50 шт.	100 шт.	50 шт.



Composi-Tight® Matrix Bands

Composi-Tight 0,035 мм	 B050	 B100	 B150	 B200	 B300
призначення	педіатричні	премолярні	премолярні, з розширенням	молярні	молярні, з розширенням
висота	3,2 мм	4,6 мм	3,8 мм	6,4 мм	6,4 мм
К-ТЬ.	50 шт.	100 шт.	50 шт.	100 шт.	50 шт.

SG Rings

Strata-G™

кілця

висота

синє



SG400
4,7 мм

оранжеве



SG500
6,4 мм

зелене



SG600
широкі



SGR01
набір з 3-х кілець
(по 1 кожного кольору)

КОД

SG400

SG500

SG600

SG400-1

SG500-1

SG600-1

SGR01

К-ТЬ.

2

2

2

1

1

1

3

STRATA-G™

FX Rings

Composi-Tight®
3D Fusion™

кілця

висота

синє



FX400
4,7 мм

оранжеве



FX500
6,4 мм

зелене



FX600
широке



FXR01
набір з 3-х кілець
(по 1 кожного кольору)

КОД

FX400

FX500

FX600

FX400-1

FX500-1

FX600-1

FXR01

К-ТЬ.

2

2

2

1

1

1

3

Composi-Tight® 3D Fusion™

3D Rings

Composi-Tight®
3D XR™

кілця

висота

синє



3DXR
4,7 мм

оранжеве



3D500
6,4 мм

Composi-Tight® 3D XR™

КОД

3DXR

3D500

3DXR-1

3D500-1

К-ТЬ.

2

2

1

1

Original Rings

Composi-Tight® Original

для менших зубів

для великих молярів

кільця



висота

G100
стандартне

G200
подовжене

- Наша **Original** система, що започаткувала стандарт щільних та анатомічних контактів.
- Широко використовується в стоматології.

Composi-Tight®

КОД
G100
G200

К-ТЬ.
3
3

Gold Rings

Composi-Tight® Gold

для менших зубів

для великих молярів

кільця



висота

AU400
стандартне

AU500
подовжене

- Кільця нашого другого покоління системи Composi-Tight®.
- Мають сильніше сепаративне зусилля ніж кільця системи **Original**.

Composi-TightGold®

КОД
AU400
AU500

К-ТЬ.
3
3

SG Bands

Strata-G™

0,040 мм

висота

педіатричні



SG050
3,5 мм

премолярні



SG100
4,5 мм

премолярні,
з цервікальним
розширенням

—

премолярні,
малі молярні



SG175
5,5 мм

молярні



SG200
6,5 мм

молярні,
з цервікальним
розширенням



SG300
7,5 мм

КОД

SG050
SG100
SG175
SG200
SG300

К-ТЬ.

100
100
100
100
100

Firm Bands

Composi-Tight® 3D Fusion Firm™

0,038 мм

висота

—



FXH100
4,3 мм



FXH150
4,3 мм
5,9 мм з розш.



FXH175
5,3 мм



FXH200
6,1 мм



FXH300
6,1 мм
7,7 мм з розш.

КОД

FXH100
FXH150
FXH175
FXH200
FXH300

К-ТЬ.

100
100
100
100
100

FX Bands

Composi-Tight® 3D Fusion™

0,038 мм

висота

—



FX100
4,4 мм



FX150
4,1 мм
6,0 мм з розш.



FX175
5,6 мм



FX200
6,6 мм



FX300
6,0 мм
8,7 мм з розш.

КОД

FX100
FX150
FX175
FX200
FX300

К-ТЬ.

100
60
100
100
60

SXR Bands

Slick Bands™ XR

0,038 мм

висота

—



SXR100
4,6 мм



SXR150
3,8 мм
5,4 мм з розш.



SXR175
5,4 мм



SXR200
6,4 мм



SXR300
6,4 мм
8,6 мм з розш.

КОД

SXR100
SXR150
SXR175
SXR200
SXR300

К-ТЬ.

100
60
100
100
60

NiTin Bands

NiTin™	педіатричні	премолярні	премолярні, з цервікальним розширенням	премолярні, малі молярні	молярні	молярні, з цервікальним розширенням	код	к-ть.
0,038 мм							NTG100	50
висота	—	NTG100 4,0 мм 4,4 мм з розш.	NTG150 4,1 мм 6,0 мм з розш.	NTG175 5,0 мм 5,6 мм з розш.	NTG200 5,4 мм 6,6 мм з розш.	NTG300 6,0 мм 8,7 мм з розш.	NTG150	50
							NTG175	50
							NTG200	50
							NTG300	50

M Bands

Composi-Tight®							код	к-ть.
0,035 мм							M050	50
висота	M050 3,2 мм 4,2 мм з розш.	M100 4,6 мм	M150 3,8 мм 5,4 мм з розш.	M175 5,5 мм	M200 6,4 мм	M300 6,4 мм 8,6 мм з розш.	M100	100
							M150	50
							M175	100
							M200	100
							M300	50

AU Bands

Composi-Tight® Gold®							код	к-ть.
0,035 мм				—			AU050	50
висота	AU050 3,2 мм 4,2 мм з розш.	AU100 4,6 мм	AU150 3,8 мм 5,4 мм з розш.	—	AU200 6,4 мм	AU300 6,4 мм 8,6 мм з розш.	AU100	100
							AU150	50
							AU200	100
							AU300	50

B Bands

Composi-Tight® Original							код	к-ть.
0,035 мм				—			B050	50
висота	B050 3,2 мм 4,2 мм з розш.	B100 4,6 мм	B150 3,8 мм 5,4 мм з розш.	—	B200 6,4 мм	B300 6,4 мм 8,6 мм з розш.	B100	100
							B150	50
							B200	100
							B300	50



Клінічний випадок
Реставація стінки
зуба з глибоким
цервікальним краєм
Dr. Daniele Gensini

У цьому випадку необхідно перекрити цервікальний край, який знаходиться в дуже глибокому положенні, але все ще може бути ізольований за допомогою рабердама, і відтворити адекватний профіль виходу зуба. Завдяки особливій конструкції матриць SlickBands™ цей крок був легким, і можна було вивести реставрований край у вигідне для нас положення. Згодом, після відтворення прямого покриття відсутнього бутра завдяки попередньо створеному силіконовому зліпку, відсутню проксимальну стінку було реконструйовано за допомогою анатомічної матриці Comprosi-Tight® 3D Fusion™, що дозволило отримати правильний профіль на виході та відповідну проксимальну контактну точку. Зрештою, завершено моделювання реставрації та перевірено правильність оклюзійних контактів.



Мал. 1 Чиста порожнина з глибоким цервікальним краєм



Мал. 2 Оклюзійний вигляд ключової частини



Мал. 3 Розміщення матриці SlickBands™ з правильним профілем виходу



Мал. 4 Точна адаптація матриці до цервікального краю



Мал. 5 Вибіркове протравлення емалі



Мал. 6 Універсальний адгезив



Мал. 7 Заповнений високотекучим композитом для реконструкції глибокого цервікального краю



Мал. 8 Краї ущільнені, а дентин покритий текучим композитом



Мал. 9 Відновлений край у вигідному положенні та з правильним профілем контуру



Мал. 10 Силіконовий зліпок для полегшення реконструкції відсутнього бугра



Мал. 11 Реконструйований зубний бугор



Мал. 12 Правильна адаптація матриці Composit-Tight® 3D Fusion™ до нового відреставрованого краю



Мал. 13 Нанесення композиту для відновлення проксимальної стінки



Мал. 14 Щойно реконструйована проксимальна стінка



Мал. 15 Завершення моделювання оклюзійної поверхні



Мал. 16 Завершена та відполірована реставрація



Мал. 17 Латеральний вигляд виправленого профілю зуба



Мал. 18 Після зняття рабердаму



Мал. 19 Оклюзійна перевірка



Tips & Tricks

SlickBands™


Tofflemire-style

Спеціальне стійке до прилипання покриття розроблене Garrison: сучасні бонди можуть прилипати до матриць без такого покриття, але не до матриць Slick Bands™.


Надійне
гінгівальне
ущільнення для
всіх реставрацій.



Збільшений вигин нової матричної стрічки Right-Curve™ створює надійне гінгівальне ущільнення та при цьому краще досягає поверхні сусідніх зубів задля досягнення ширших та глибших зон контактів. Це створює значно збільшений воронкоподібний конус при обертанні матриці навколо зуба. Це вірний вибір для багатьох реставрацій.

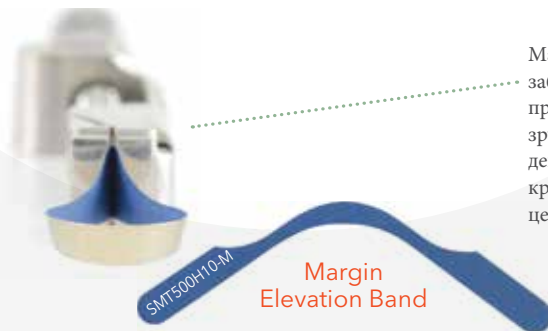

Матриця Margin Elevation Band забезпечить вам найкращу адаптацію і приєднання контуру для реконструкції зруйнованого краю. Висота матриці дещо зменшена, щоб забезпечити кращу адаптацію до глибокого цервікального краю.

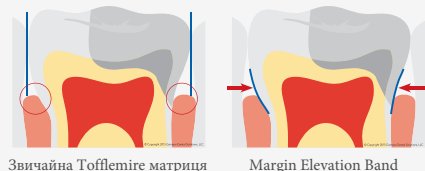

Звичайна Tofflemire матриця

Margin Elevation Band

Slick Bands™

код	опис	К-ТЬ.
М'які матриці з неприлипаючим покриттям (зелені)		
SMT400D10-M	Right-Curve™ матриці	50 шт.
Звичайні матриці з неприлипаючим покриттям (сірі)		
SMT400H10-M	Right-Curve™ матриці	50 шт.
Матриці Margin Elevation Bands з неприлипаючим покриттям (сині)		
SMT500H10-M	Margin Elevation Band	50 шт.
SMT500S01	Margin Elevation Band	20 шт.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Ultra Adaptive Wedges

Комбінація адаптивного матеріалу Soft-Face™, та механічно-пружного внутрішнього матеріалу осердя забезпечуються унікальні робочі показники клинця. Такий клинець ніколи не підведе.



FXK4-M

Безболісність.
Заокруглений та гладенький кінчик клинців запобігає травмуванню м'яких тканин.

Захват.

Універсальна секція для захвату. Дозволяє використовувати різні види затискачів, пінцетів чи іншого подібного інструменту, для встановлення клинця.



Гребінці.

Завдяки гнучким гребінцям вилізання вже встановленого клинця тепер цілковито в минулому.

Міцні всередині.

Внутрішня частина працює як традиційний клинець – надає легкості встановлення та стійке сепараційне зусилля.


М'які ззовні.

Покриття Soft-Face™ робить цей клинець унікальним, адже забезпечує його неймовірну адаптивність.

Composi-Tight® 3D Fusion™ клинці

код	опис	к-ть.
FXK4-M	Composi-Tight® 3D Fusion™ набір клинців (по 50 шт. кожного розміру)	200 шт.
FXK4	Composi-Tight® 3D Fusion™ набір клинців (по 100 шт. кожного розміру)	400 шт.
FXYL	надмалі, жовті	100 шт.
FXBL	малі, сині	100 шт.
FXOR	середні, оранжеві	100 шт.
FXGR	великі, зелені	100 шт.

See how
it works!

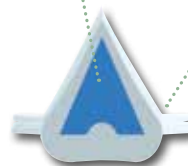

**Надійність встановлення.**

Вислизанню клинця запобігає особлива текстура його поверхні.

Безболісність. Заокруглений та гладенький кінчик клинців запобігає травмуванню м'яких тканин. Клинці легко встановлювати і він не зачіпляється за рабердам.

Адаптивність. Клинці легко адаптується до природних поверхонь завдяки м'якому пластику.

Надійне ущільнення. Вигини та кути форми клинця максимально повторюють інтерпроксимальну анатомію поверхонь.

Зручний апплікатор. Щоб вставити Wedge Wand™ не потрібні додаткові інструменти. Після встановлення клинця апплікаційну ручку можна зняти простим поворотним рухом. Або ж ручку можна залишити на місці для зручного коригування позиції уже встановленого клинця чи його легкого видалення.

WedgeWands®



WK4

КОД	ОПИС	К-ТЬ.
WK4	Wedge Wands™ набір клинців в асорт.	400 шт.
SWYL	надмалі, жовті	100 шт.
SWBL	малі, сині	100 шт.
SWOR	середні, оранжеві	100 шт.
SWGR	великі, зелені	100 шт.

A+Wedge®



GWAK4

A+ Wedge™ клинці контролюють кровотечу.

Ці клинці допоможуть виконати реставрацію чистіше і швидше. Окрім неймовірної адаптивності до природних інтерпроксимальних поверхонь, клинці A+Wedges™ мають спеціальне алюміній сульфат покриття, яке має стійкий в'язучий ефект та запобігає виникненню кровотечі ясен. Клинці також мають достатню довжину та спеціальний дизайн, що забезпечує якісну роботу без несподіваних вислизань.

КОД	ОПИС	К-ТЬ.
GWAK4	A+Wedge набір клинців в асорт.	200 шт.
GWAYL	надмалі, жовті	100 шт.
GWABL	малі, сині	100 шт.
GWAOR	середні, оранжеві	100 шт.
GWAGR	великі, зелені	100 шт.



Клінічний випадок Реставрація класу IV за допомогою Blue View™ VariStrip™

Dr. Gianluca Rossi

До нас на огляд звернувся пацієнт із повідомленням про побутову травму (II клас за Еллісом), яка призвела до перелому елемента 2.1. Для виготовлення силіконового ключа попередньо виготовляється дослідна модель з відповідними засобами.

Після ізоляції операційної зони рабердамом, визначали форму порожнини з довгим скосом. Спочатку було реконструйовано стінку зуба зі сторони піднебіння, а потім проксимальну стінку за допомогою антеріальної матриці Blue View™ VariStrip™. Далі ми приступили до нанесення дентину та емалевих мас для завершення реставрації, також фінішна обробка і полірування для завершення всього процесу.

Власний відгук:

Я використовую матриці Blue View™ VariStrip™ щодня через їх невелику товщину та їхню змінну анатомічну структуру. Легко вставляю матрицю в інтерпроксимальний простір і протягую її, доки не буде досягнута потрібна мені висота планової реставрації. Ще одним плюсом є їх характерний блакитний колір, який гарантує чудовий контраст між матрицею та самим зубом, що забезпечує високу точність позиціонування.



Мал. 1 Початковий стан



Мал. 2 Ізоляція операційної зони рабердамом і препарування порожнини



Мал. 3 Відтворення піднебінної стінки з використанням силіконового ключа



Мал. 4 Введення антеріальної матриці Blue View™ VariStrip™



Мал. 5 Реконструкція проксимальної мезіальної стінки



Мал. 6 Результат після полірування



Мал. 7 Кінцевий стан після контрольного огляду згодом

BlueView[®] VariStrip[™]

Антеріальні матриці

Blue View VariStrip[™] стали справді революційними антеріальними матрицями завдяки своїй унікальній анатомічній кривизні вигину та змінній висоті. Товщина цієї пластикової матриці всього 0.05 мм. Ви зможете легко встановити стрічку, а потім просунути її до рівня потрібної вам висоти. Спеціально розроблена форма вигину матриці допоможе ідеально відтворити природну форму зуба.

Вигнута форма: Оптимальний вигин форми матриці і її висота, які підійдуть практично у всіх випадках реставрацій.

Блакитне забарвлення: Створює контраст між кольором поверхні зуба та самої матриці для полегшення роботи, при цьому не знижує ефективність фотополімеризації композиту.

зростання висоти стрічки в діапазоні 6-10 мм дозволить вам підібрати потрібну висоту для будь яких антеріальних реставрацій.

New

Тепер можна
замовляти і в нашому
он-лайн магазині

www.aitas.com.ua/shop/



Dr. Martin von Sontagh, Austria

Запобігають утворенню неприродно плоских поверхонь, чорних трикутників та пасток для їжі, які так часто виникали при використанні старомодних прямих матриць.

Відмінно підійдуть для реставрацій класу IV, закриття діастем і т.п.



See how
it works!

КОД	ОПИС	К-ТЬ.
VS01	VariStrip [™]	100 шт.
VS02	VariStrip [™]	50 шт.
VS03	VariStrip [™]	20 шт.



Dr. Gabriele Conte, Italy

Fusion™ Anterior Matrix System

Повністю нова система для фронтальних реставрацій від Garrison® Fusion™ Anterior Matrix System надає вам саме ті засоби та техніки, які дозволять вам реставрувати багато типів антеріальних уражень зубів з надзвичайною впевненістю. Протягом багатьох років наші клієнти показували нам як вони використовують постеріальні металеві матриці для антеріальних реставрацій. Коли розташувати матрицю вертикально, то те що було букально-лінгвальним вигином, з легкістю перетворювалось на ідеальний гінгівально-різцевий вигин для антеріального зуба. У співпраці з нашими клієнтами ми розробили металеву матрицю, яка виводить техніку подібних реставрацій на якісно новий рівень досконалості. Додайте до цього ще інтелектуальний дизайн нових клинців Fusion™ Anterior Wedges,

і ось ми отримуємо довершену систему. Ці сильно вигнуті клинці притискають матрицю до зуба на всій її довжині від лицьової аж до язикової її частини, що звільняє вам руки від додаткового утримування матриці. Це спрощує нанесення та моделювання композиту, що дозволить вам в повній мірі проявити свої творчі здібності при відновлення ідеальних усмішок ваших піцієнтів.



ANK01

ANK01 включає:

- 50 низьких матриць
- 50 високих матриць
- 25 надмалих клинців
- 25 малих клинців
- 25 середніх клинців
- 25 великих клинців

Watch the
technique video



Відтворення ідеальної посмішки!




Спробуйте
**Fusion™ Anterior
Matrix System**
вже сьогодні!

Garrison
Dental Solutions

Fusion™

Anterior Matrix System

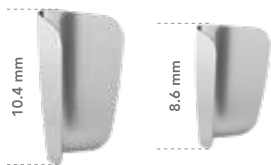

Matrix Fusion™ Anterior

	код	к-ть.
низькі	AN100-M	50 шт.
високі	AN200-M	50 шт.

Fusion™ Anterior Matrix містить безліч удосконалень, які допоможуть вам швидко та впевнено відтворити ідеальну інтерпроксимальну анатомію.

- Лише 0,038 мм – значно тонші, ніж штрипси, для відтворення кращого інтерпроксимального контакту.
- Міцна нержавіюча сталь протистоїть невимушеним деформаціям як під час розміщення, так і під час нанесення композиту в зону реставрації.
- Легко засковзує в ясенну борозну для більш глибоких реставрацій.
- Ідеальна анатомічна кривизна в ясенно-різцевому напрямку та лицьово-язиковому.
- Значно перевершує інші матриці при відновленні великих або глибоких каріозних уражень.
- Сильна кривизна забезпечує надійне ущільнення в цервікальній ділянці від лицевого до язикового краю матриці.

- Допомогає відтворити ідеальну анатомію, притискаючи матрицю до зуба.
- Унікальна Т-подібна форма сприяє глибшому розташуванню в інтерпроксимальному просторі, щоб мінімізувати «чорний трикутник».
- Конічна роздільна стійка дозволяє регулювати величину тиску, що чиниться, для контролю інтерпроксимального контакту.
- Цервікальна поверхня знаходиться наполовину вище і наполовину нижче борозни для максимальної адаптації при більш глибоких реставраціях.



Fusion™ Anterior клинці

Продумані особливості клинця Fusion™ Anterior Wedge роблять його незамінним для усіх антеріальних реставрацій

- Сильна кривизна забезпечує міцне пришийкове ущільнення від лицевого до язикового краю.
- Допомогає відтворити ідеальну анатомію, притискаючи матрицю до зуба.
- Унікальна Т-подібна форма дозволяє глибше розташування в інтерпроксимальному просторі, щоб мінімізувати «чорний трикутник».
- Конічний роздільний гребінь дозволяє регулювати величину тиску, що чиниться для контролю інтерпроксимального контакту.
- Цервікальна поверхня знаходиться наполовину вище і наполовину нижче борозни для максимальної адаптації при більш глибоких реставраціях.

опис	код	к-ть.
Fusion Anterior Wedge набір клинців	ANK4-M	200 шт.

опис	код	к-ть.
надмалі, жовті	ANYL-M	50 шт.
малі, сині	ANBL-M	50 шт.
середні, оранжеві	ANOR-M	50 шт.
великі, зелені	ANGR-M	50 шт.



3D model

Strata-G™ wedges

klinці для
класу II



SGYL
надмалі, жовті

XS



SGBL
малі, сині

S



SGOR
середні, оранжеві

M



SGGR
великі, зелені

L



SGK4
набір клинців
400 шт. в асорт.



SGK4-M
набір клинців
200 шт. в асорт.

КОД	К-ТЬ.
SGYL	100
SGBL	100
SGOR	100
SGGR	100
SGK4	400
SGK4-M	200


Composi-Tight® 3D Fusion™ wedges

klinці для
класу II



FXYL
надмалі, жовті

XS

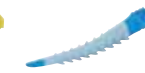

FXBL
Small, blue

S



FXOR
Medium, orange

M



FXGR
Large, green

L



FXK4
набір клинців
400 шт. в асорт.



FXK4-M
набір клинців
200 шт. в асорт.

КОД	К-ТЬ.
FXYL	100
FXBL	100
FXOR	100
FXGR	100
FXK4	400
FXK4-M	200

Fusion™ Anterior wedges

klinці для
фронту,
класу III та IV



ANYL
надмалі, жовті

XS



ANBL
малі, сині

S



ANOR
середні, оранжеві

M



ANGR
великі, зелені

L



ANK4
набір клинців
400 шт. в асорт.



ANK4-M
набір клинців
400 шт. в асорт.

КОД	К-ТЬ.
ANYL	100
ANBL	100
ANOR	100
ANGR	100
ANK4	400
ANK4-M	200

Wedge Wands® opaque

klinці для
класу II



SWYL
надмалі, жовті

XS



SWBL
малі, сині

S



SWOR
середні, оранжеві

M



SWGR
великі, зелені

L



WK4
набір клинців
400 шт. в асорт.

КОД	К-ТЬ.
SWYL	100
SWBL	100
SWOR	100
SWGR	100
WK4	400

A+ Wedges™ with aluminum sulfate

klinці для
класу II



GWAYL
надмалі, жовті

XS



GWABL
малі, сині

S



GWAOR
середні, оранжеві

M



GWAGR
великі, зелені

L



GWAK4
набір клинців
200 шт. в асорт.

КОД	К-ТЬ.
GWAYL	100
GWABL	100
GWAOR	100
GWAGR	100
GWAK4	200

ЩО МИ
ПОКРАЩИЛИ:

Composi-Tight® 3DFusion™
секційна матрична система

Більша довговічність
кілець завдяки
залученню покращених
методів виробництва

Спеціальне подовження
подушечок **Ultra-Grip™**
запобігає зіскакуванню
кілець.

Перше подібне кільце
спеціально розроблене для
надшироких реставрацій.

Відмінна
інтерпроксимальна
сепарація
зубів.

М'яке покриття подушечок
Soft-Face™ дозволяє досягти
необхідної анатомічної
форми матриці.

The Award
Winning



Matrix Materials - Wedges
Matrix Materials & Systems



*wide preparations
green ring*

Garrison
Dental Solutions


PerForm™ все під вашим контролем.

- Покращує контакти з використанням будь-якої матричної системи
- Відмінний контроль висоти і ширини контактів
- Підвищує щільність сформованих контактів
- Лінза Френеля рівномірно розподіляє світло при фотополімеризації

код	опис	к-ть.
CFK01	PerForm™ набір інструменту	2 шт. (по 1 шт. кожного)
CF100	1,1 мм малий інструмент	2 шт.
CF200	2,0 мм великий інструмент	2 шт.

“Щоб забезпечити щільний контакт, наносилась порція текучого композиту в інтерпроксимальну коробку, який утримувався міларом від сусіднього зуба, при одночасному формуванні контакту інструментом “PerForm”. Це дозволяє бути впевненим, що контакт щільний і надійно сформований, поки виконується фотополімеризація.”

Dr. Jack D. Griffin, Jr. США

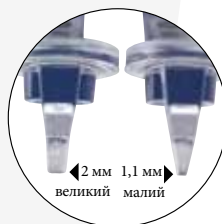

Як працює PerForm™:



Крок 1:

Нанесіть першу порцію композиту, притисніть його інструментом PerForm дистально (див. мал.1), або мезіально (див. мал.2).



Крок 2:

Розмістіть джерело фотополімеризуючого світла прямо на лінзу Френеля інструменту PerForm, та виконайте фотополімеризацію композиту.



Garrison®

Найкращі щипці для кілець

Система Composi-Tight® 3D Fusion™ включає досконалі щипці посиленої конструкції з нержавіючої сталі для встановлення кілець. Незалежно від розміру вашої руки або її сили, щипці Composi-Tight® 3D Fusion™ забезпечать вам неймовірний контроль над точним розміщенням надміцних сепараційних кілець навіть на найширших молярах. Щипці Composi-Tight® 3D Fusion™ відмінно працюватимуть практично з усіма кільцями будь якого виробника.

Щипці Garrison®
для встановлення кілець
FXP01



NEW!



Ring Placement Forceps

Holds all your sectional matrix system rings.



Щипці для встановлення кілець
AUMRDF-100



Універсальні щипці для
встановлення кілець
UNVF-100



AUMRDF-100



UNVF-100

Composi-Tight® Matrix Forceps

Precise Placement, Unbeatable Grip.

Точність встановлення: кінчик щипців виконаний під кутом 75° з оклюзійно-ясенною орієнтацією, забезпечуючи зручніший кут розміщення, ніж котонові щипці. Мініатюрні твердосплавні вкладки дозволяють захопити матрицю за верхній край, щоб запобігти спотворенню її інтерпроксимальної області.

Щипці для матриць
BFA-1 загнутий кінець для оклюзійного розміщення

Неймовірний захват: вкладки з карбід вольфраму забезпечують винятковий тактильний контроль.

Супер захват!

Без зайвих зусиль видаляйте матриці, які раніше завдавали вам надмірних труднощів.



Composite Instruments

Nonstick titanium-nitride coated

Наш мультифункціональний інструмент для роботи з композитом має різні робочі вістря з обох боків. Тепер ви можете сміло розпочинати всі необхідні дії під час виконання композитних реставрації без необхідності постійно змінювати інструмент!



TN008

5-in-1

код

TN008

опис

5-в-1 мультифункціональний інструмент
2 штопфери, шаровидний штопфер, гладилка, голівка-жолудь



TN009

5-in-1

код

TN009

опис

5-в-1 мультифункціональний інструмент
2 гладилки, 2 штопфери, голівка-жолудь



TN009

Louis Mackenzie,
Великобританія

- Великий діаметр і легкість ручки покращують ергономіку інструменту.
- Спеціальне покриття до якого не прилипає композит при його нанесенні і моделюванні.
- На 40% твердіший ніж нержавіюча сталь.
- Добре переносить різні методи очистки та стерилізації, в тому числі ультразвукову очистку.



Watch the
technique video.

Загальні примітки з безпеки

Застереження:

- Система Composi-Tight® складається з малих, гострих деталей. Перед виконанням будь яких процедур з використанням цієї системи рекомендовано встановити рабердам, або інший ізоляційний засіб. Як і у випадку з усіма інтраоральними інструментами, необхідно пройти певне тренування, перш ніж ви досягнете стабільного і безпечного поводження з інструментом.
- Аспірація: у випадку вдихання матриці, клинця чи кільця, необхідно негайно звернутись за медичною допомогою.
- Проковтування: в разі випадкового проковтування елементів системи, рекомендуйте пацієнту звернутись за медичною допомогою. В разі ж нудоти чи погіршення стану самопочуття слід негайно звернутись за медичною допомогою.

Більш детальні інструкції зі стерилізації можна знайти на:

www.garrisondental.com/cleaning-sterilization

Стерилізація та очистка Composi-Tight® 3D Fusion,[™] 3DXR[™] та 3D:

- Стерилізуйте продукцію в автоклаві використовуючи лише стерилізаційні пакети, що пройшли сертифікацію CE.
- Стерилізуйте лише в автоклаві. Цикл стерилізації 6 хвилин при температурі 132-134°C та тиску 210 кПа, з часом подальшого висихання 20-30 хвилин; будь ласка, також слідуйте додатковим вказівкам виробника стерилізаційного обладнання. Ніколи не перевищуйте температуру в 137°C.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ хімічних засобів стерилізації

Очистка:

- Усуньте всі видимі залишки матеріалів до стерилізації.
- Використовуйте для цього нейлонову чи подібну до неї якусь іншу м'яку щіточку. Будьте особливо обережні, уникайте пошкоджень силіконових елементів Soft-Face[™] під час очищення.
- Якщо залишки матеріалів не вдалось усунути з першого разу, будь ласка, повторіть процедуру знову.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ хімічні розчини, що містять спирт, ацетон чи кетон.

Garrison

Dental Solutions

150 DeWitt Lane
Spring Lake, MI 49456
USA



www.aitas.com.ua

www.garrisondental.com

